



## NOTE AUX UTILISATEURS DES VISIÈRES SOLIDAIRES

Ces visières anti-projection ne protègent **que contre les projections** (postillons, salive, sécrétions, etc). En aucun cas **elles ne peuvent remplacer les masques FFP2 ou tout autre type de masque médical homologué.** Elles ne viennent qu'en complément de ces masques professionnels et ajoutent une protection supplémentaire. Elles permettent également d'empêcher - par reflex - de porter ses mains à son visage.

Bien que les personnes qui ont imprimé et assemblé ces visières ne présentaient pas de symptômes de coronavirus au moment de leur fabrication, elles doivent être considérées comme suspectes et donc **être désinfectées avant toute première utilisation.**

Ces visières résistent aux pratiques habituelles de stérilisation (eau oxygénée ou eau savonneuse, bain de désinfection, stérilisation par gaz) à l'exception de toute technique utilisant une chaleur supérieure à 60° C (qui ferait ramollir, voire fondre le plastique).

Le bandeau des visières est imprimé en PLA (ou acide polylactique) principalement composé d'amidon de maïs et le masque-visière est constitué soit d'une feuille transparente de reliure, soit d'une feuille plastifiée passée à vide dans une plastifieuse (il peut être changé). L'ensemble ainsi constitué reste relativement fragile et doit donc être manié avec soin.

Ces visières – dont le modèle repose sur un fichier en licence **open source** - ont été fabriquées et distribuées bénévolement, dans un esprit solidaire afin de pallier au manque de ressources face à l'épidémie de coronavirus. **Elles ne peuvent être vendues.**

Si cela vous est possible, nous serions heureux de recevoir une photo de ces visières portées dans le cadre de l'utilisation que vous en ferez, afin de publier cette photo sur le compte Facebook de notre groupe. Non seulement cela nous encourage dans notre démarche, mais surtout cette communication favorise le recrutement d'autres Makers, afin d'augmenter la capacité de production.

**Les concepteurs, distributeurs, assembleurs de ces visières ne pourront en aucun cas être tenus responsables juridiquement de l'usage qui en est fait, ni des conséquences matérielles ou médicales relatives à cet usage.**

Si vous avez demandé à être équipé de ces visières, c'est probablement que pour une raison professionnelle vous êtes potentiellement exposés à des porteurs de la maladie. Aussi toute l'équipe de des **Makers du 05 contre le COVID-19** vous adresse sa plus vive reconnaissance et toute son admiration qui accompagnent nos sincères encouragements pour cette bataille !

**L'équipe des Makers du 05 contre le COVID-19**  
<https://www.facebook.com/groups/575410729733524/>